

# Lavado Manual de Endoscopia/instrumentos y accesorios para cirugía robótica (Da Vinci®)

Torronteras Guerreo, M<sup>a</sup> A.; Navarro Celiméndiz, M<sup>a</sup> J. ; Bonnin Pujol M. ; Fajardo Navarro, P.







## Material necesario:

- Ultrasonido
- Jeringa de 20 ml (o de 10 ml)
- Solución enzimática y agua
- Cepillo de cerdas de nailon
- Lámpara con lupa
- Pistola de agua a presión
- Pistola de aire a presión

Con estas dos ruedas podemos abrir y cerrar las puntas de las pinzas que lo permitan (tijera, porta agujas, pinza de disección,...)

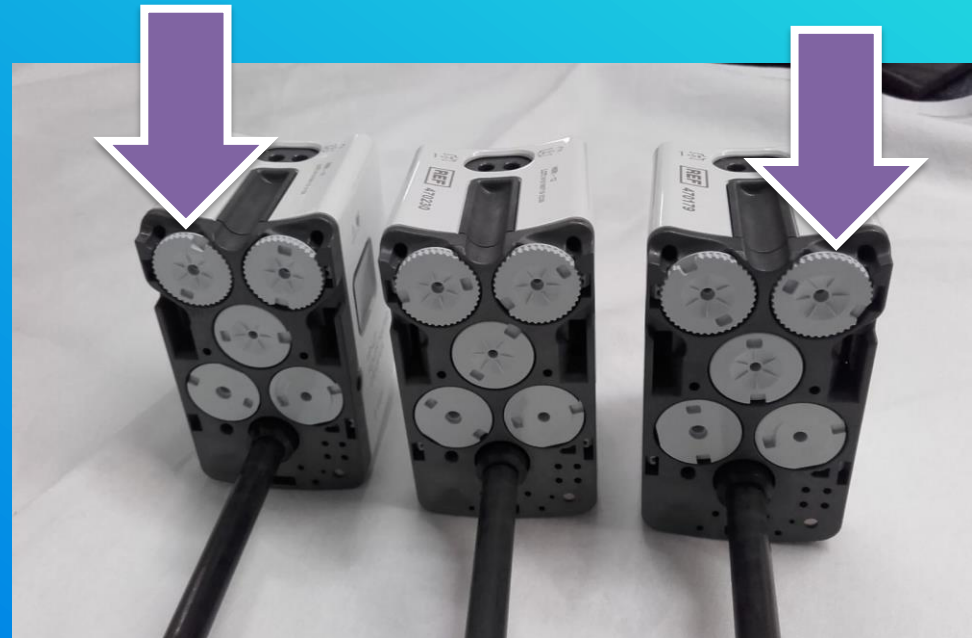


Preparemos el ultrasonido con la mezcla de agua y solución enzimática, donde introduciremos las pinzas y demás material, **excepto los cables**, dejándolo sumergido por completo, un mínimo de 15 minutos.

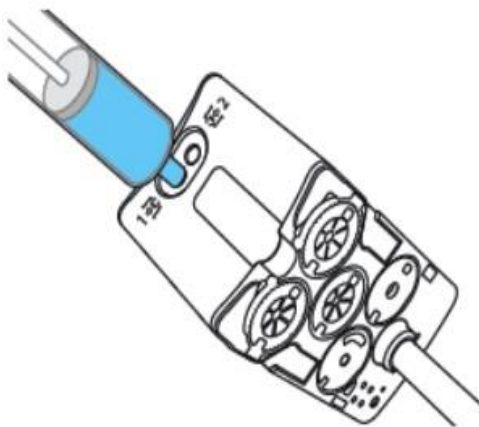

Hay 2 puertos de lavado:

- ① Puerto de lavado principal (número 1)
- ② Puerto de lavado (número 2)



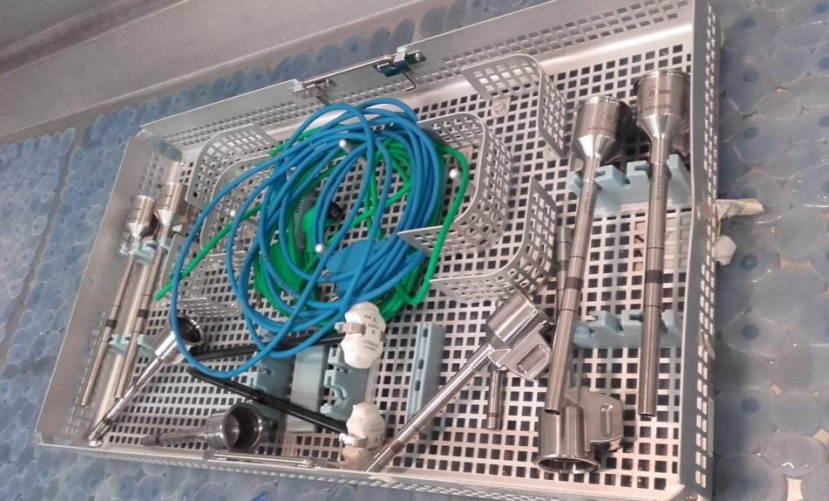

El resto de material, **excepto los cables**, los sumergiremos en el ultrasonido mientras limpiamos las pinzas y luego los pasaremos por la termodesinfectadora.

Realizamos el cheking de las cajas para comprobar que la caja esta completa

Identificador	Referencia	Nombre	Instrucciones de montaje
00051715	470172	DISSECTOR BIPOLAR DA VINCI	
00051716	470006	PORTAGULLES MONOPOLAR DA VINCI	
00051717	470183	PERMANET CAUTERY HOOK 8MM	
00051718	470347	TIP-UP FENESTRATED GRASPER 8MM	
00075598	470205	PINÇA FENESTRADA BIPOLAR DA VINCI	
00051720	470093	PROGRASP FORCEPS (PINÇA FENESTRADA) 8mm	
00051721	470230	HEM-O-LOK DA VINCI (LILA) 8MM LARGE CLIP APPLIER	
00051722	470327	HEM-O-LOK DA VINCI(VERD) ML/MEDIUM-LARGE 8mm	
00079793	470033	BLACK DIAMOND MICRO FORCEPS 8mm	
00051724	470383-03VL1	CABLE MONOPOLAR VERDE	
VL162501	470384	CABLE BIPOLAR AZUL	
00051726	26775JF	GANXO ELECTRODE DE COAGULACIÓ I DISSECCIÓ 5mm 36cm	
VH44108	<input checked="" type="checkbox"/> A5690	PORTA LPC	
VH50572	381327-01201	LLAVE KIT LIBERACION DEL SELLADOR VASCULAR	
VH36128	27502	CONNEXIÓ METAL-LICA AMB CLAU LUER	
VH44112	33300	VAÏNA LAPAROSCOPIA 5mm 36cm	
00051733	33121	MANEC MONOPOLAR S/CREMALLERA	
VH08897	<input checked="" type="checkbox"/> 33300	VAÏNA LAPAROSCOPIA 5mm 36cm	
VH53789	33310C	INSERT PINÇA INTESTINAL FENESTRADA PALA LLARGA 5mm	
VH50568	<input checked="" type="checkbox"/> 33132	MANEC METAL-LIC A/CREMALLERA	
VH50569	<input checked="" type="checkbox"/> 470002-07	TROCAR METAL-LIC Nº8 CURT	
VH50571	<input checked="" type="checkbox"/> 470003-07	TROCAR METAL-LIC Nº8 CURT	



Empaquetamos la caja para poder proceder a su esterilización.

Gracias por su  
atención

Torronteras Guerreo, M<sup>a</sup> A.; Navarro Celiméndiz, M<sup>a</sup> J. ; Bonnin Pujol M. ; Fajardo Navarro, P.