

Aesculap Surgical Technologies

Medidas para una correcta conservación del instrumental




I Aceite de conservación Sterilit®

- Base: aceite de parafina/aceite blanco
- Disminuye la fricción y protege los instrumentos contra la corrosión por fricción
- Garantiza buenas propiedades de deslizamiento y lubricación
- Inocuidad fisiológica probada según ISO 10993
- Respetuoso con el medio ambiente (sin CFC)
- Apto para esterilización a vapor según ISO 17665-1 y esterilización por aire caliente hasta una temperatura máxima de 180°C.

II Esterilizabilidad

Su fórmula especial garantiza la permeabilidad de la película de aceite, que es penetrada por el vapor de agua durante el procedimiento de esterilización incluso en los puntos menos accesibles.

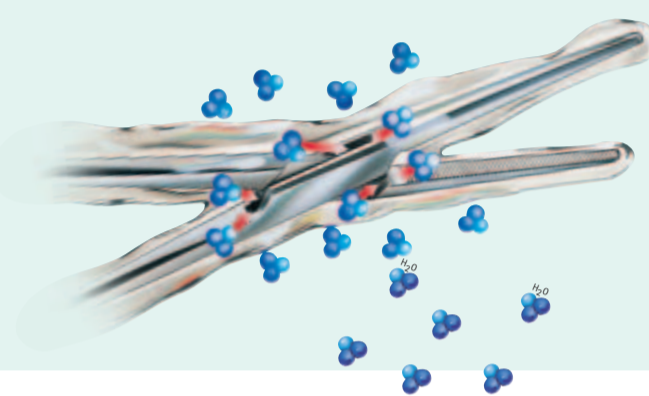

III Características

De acuerdo con los requisitos establecidos por el Grupo de trabajo para el trato y cuidado del instrumental (A.K.I. por sus siglas en alemán), Sterilit® tiene las siguientes características:

- Película de aceite permeable al vapor de agua
- La película de aceite no afecta a la esterilidad del instrumento
- Efecto lubricante y anticorrosivo
- No contiene silicona ni deja manchas o incrustaciones en la superficie de los instrumentos.

IV Manipulación correcta

- Aplíquelo únicamente antes de la esterilización
- Consérvelo en un lugar fresco, seco y protegido de la luz
- Tenga en cuenta la fecha de caducidad
- Antes de aplicar Sterilit®, limpie y prepare los productos médicos que precisan lubricación tal y como se especifica en las instrucciones de manejo.

V Nota

Sterilit® cuenta con el marcado CE y cumple las disposiciones de la Directiva de la CE sobre productos sanitarios MDD 93/42/EWG.

Encontrará más información en el folleto „El método correcto para el tratamiento de instrumentos“

que puede descargar de la página

www.a-k-i.org



JG600

JG598

JG600 STERILIT®

Aceite en spray Aesculap (sin CFC) para el cuidado de los instrumentos antes de la esterilización. Incluye dos boquillas rociadoras.

JG598 STERILIT®

Aceite para instrumentos Aesculap, para lubricar las articulaciones, los bloqueos, etc. antes de la esterilización.

Tijeras



Lubricación de la articulación de las tijeras

Portagujas



Lubricación de la articulación pasante

Pinzas



Lubricación de la articulación pasante

Alicates



Lubricación de tornillos en articulaciones dobles

Instrumentos de microcirugía



Lubricación de un portagujas microquirúrgico

Portagujas para endoscopia



Lubricación de un bloqueo

Osteótomos



Lubricación de un osteótomo

Osteótomos



Lubricación de un osteótomo

Contacto

Cómo se usa. Consejos prácticos.

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Aesculap AG
Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen
Alemania
Phone +49 7461 95-0
Fax +49 7461 95-2600
www.aesculap.de